

for HOME

Mais que
um produto.
Entregamos
segurança,
praticidade e
tranquilidade.



O *for HOME*, é um sistema de alimentação secundário de energia DC que entra em ação, alimentando os dispositivos a ele conectado, quando há uma interrupção no fornecimento de energia elétrica primária. Sua alimentação é provida por um sistema de baterias, que permanece carregando enquanto a rede elétrica está funcionando corretamente. Quando há uma falta de energia elétrica na tomada, o produto entra em modo bateria e continua a fornecer a energia DC ao equipamento conectado.

Produto Portátil
+ Energia
Baixo Consumo
Mais Prático



www.lrstech.com.br

11 94050-1787
contato@lrstech.com.br

 [@lrstechsolucoes](https://www.instagram.com/lrstechsolucoes)

Modo de uso:

Conecte o *HOME* na tomada e ligue o botão de liga/desliga, a Luz verde (Modo Rede) acenderá, nesse momento o equipamento já estará carregando, então, conecte o cabo DC do equipamento ao *HOME* pelo conector metálico (Circular 4 vias), em seguida conecte a outra extremidade ao seu equipamento (de acordo com o adaptador de seu equipamento). Pronto, seu equipamento já estará equipado com o sistema anti falha de energia elétrica.

Durante o uso, caso a energia da tomada acabe, o *HOME* entrará em (Modo bateria), indicando com a Luz vermelha, continuando a fornecer energia ao equipamento conectado. Ao retornar energia para tomada, o Led Verde (Modo Rede) acenderá novamente, voltando a carregar as baterias enquanto está sendo utilizado o produto.

- Tempo mínimo de carga (8 horas). Pode-se deixar o produto na tomada sempre.
- Tempo de autonomia (Dependerá da usabilidade do equipamento conectado).

Quanto mais recursos exigir o equipamento conectado, menor será a autonomia em Modo Bateria.

Precauções

- O produto deve estar sempre carregado (em caso de não usabilidade, carregar a bateria a cada 30 dias, por 8 horas).
- Assegure-se que o produto que irá conectar ao *HOME* seja alimentado pela tensão equivalente a sua saída de energia.
- Assegure-se que o equipamento permaneça na tomada carregando.
- Evite derramar líquidos ou sujidades sobre o equipamento.
- Deixe o equipamento ligado em um ambiente ventilado (Longe de cortinas, cobertores, ou tecidos), evitando o sobreaquecimento do produto.
- Evite usar o produto como transporte, pode haver mau funcionamento por conta de solavancos e quedas.
- Utilize a conexão correta para seu equipamento.
- O *HOME* não substitui a fonte original do seu produto.

Este produto não é um produto médico e também não é de suporte à vida, apenas uma solução para utilização de equipamentos eletrônicos em casos de falta de energia.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Não serão cobertos na garantia danos causados por fenômenos da natureza; Mau uso ou uso em desacordo com o este documento; danos causados por ligação em rede elétrica com tensão diferente da especificada ou flutuações excessivas; danos causados por queda ou qualquer outro tipo de acidente; produtos que apresentem sinais de violação do selo de garantia, ajustes ou modificações feitas por pessoas não autorizadas pela LRStech Soluções.

Garantia de 1 ano para o produto e 6 meses para as baterias.

A garantia é contra defeitos de fabricação e a sua validade é iniciada a partir da data de venda ao Consumidor FINAL.

Em caso de defeito, o consumidor deverá encaminhar o aparelho ao Departamento de Assistência Técnica, acompanhado da sua Nota Fiscal, que deverá estar do lado de fora da embalagem.

O envio da mercadoria e as despesas relacionadas ao seu frete são de inteira responsabilidade do consumidor.



www.lrstech.com.br

11 94050-1787
contato@lrstech.com.br

 [@lrstechsolucoes](https://www.instagram.com/lrstechsolucoes)