

Remova esta página ao imprimir

Especificações de impressão para o molde de medição da máscara

Tamanho: 160 × 144 ± 1 mm

Material: Papel couchê fosco dupla face 300 g, com revestimento em ambos os lados

Impressão: Impressão colorida em apenas um lado, sem conteúdo no verso



1

Após imprimir em 100%, se a marcação entre "0 cm" e "1" medir exatamente 1 cm, a régua está em escala correta.



2

Após confirmar se o guia foi impresso corretamente, recorte-o ao longo da linha pontilhada de acordo com as indicações

3

Coloque o guia de tamanho na base do seu nariz como mostrado na figura ao lado, e experimente cada tamanho para definir o mais adequado.



Máscara Facial (Full Face Mask)



BS-23-11-27-001-V2.2

Verificação de Escala




L (Grande) ▶

M (Médio) ▶

S (Pequeno) ▶

Máscara Facial (Full Face Mask)

F5+ / F5A+ / F5 / F5A / F5AS /
F4 / HM01 / F3 / BMC-FM2 /
F2 NV1 / F2 NV2 / F1B / BMC-FM1A

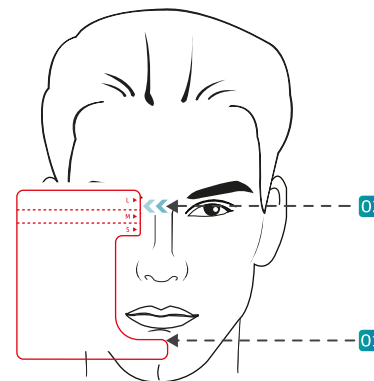

01 Alinhe a borda com a depressão do queixo.

02 Verifique a posição alinhada com a ponte nasal para determinar o tamanho



cuidados familiares