

Guia de Colocação

Antes de colocar a máscara, remova o suporte da armação flexível cor-de-laranja da parte traseira da máscara e guarde-o para utilização futura.



- Com os cliques inferiores do arnês libertados, posicione a almofada inclinada sobre a cana do nariz.



- Mantendo a posição superior da máscara, encoste a parte inferior da máscara no rosto.



- Segure firmemente a máscara contra a face e passe o arnês sobre a cabeça.



- Puxando as correias inferiores por baixo das orelhas, prenda o arnês na parte inferior da armação flexível.



- Desaperte o Velcro®, puxe as correias superiores do arnês uniformemente até ficarem confortáveis e firmes e volte a prender o Velcro.



- Repita o passo 5 com as correias inferiores do arnês.



- Ligue uma extremidade da tubagem de ar à peça giratória e a outra extremidade ao dispositivo de fluxo de ar.
- Ligue o dispositivo de fluxo de ar.

Sugestão um



- Verifique se o arnês está posicionado correctamente na cabeça.

Sugestão dois



- Assegure-se de que a máscara fica a meio da cana do nariz e não prejudica os olhos.

Quattro™ FX
FULL FACE MASK

www.quattrofx.com