



GUIA DE TAMANHO

1 Imprima o guia de tamanho em "Tamanho real" ou "100%".

Para conferir se a impressão está correta verifique se o quadrado mede 2,5 cm:



2 Após confirmar se o guia foi impresso corretamente, recorte-o de acordo com as indicações

3 Mantenha a boca naturalmente aberta e experimente cada tamanho para definir o mais adequado.



DICA: (1) A base da almofada deve ficar no meio do queixo (cerca de 1 cm abaixo do lábio inferior). **(2)** A parte superior da almofada deve ficar na ponte nasal alinhada com a altura dos olhos. Se a medida ficar entre dois tamanhos, escolha o menor.

2,5 cm

AirFit™ F20
Full face mask
Full face mask **for Her**

S **M** **L**
SIZE

S **M** **L**
SIZE

© 2017 ResMed Ltd. All Rights Reserved. Specifications may change without notice. Product availability may vary across regions.

CPAPS
.COM.BR

ResMed