




# GUIA DE TAMANHO

- 1 Imprima o guia de tamanho em "Tamanho real" ou "100%". Para conferir se a impressão está correta, verifique se o quadrado mede 2,5cm

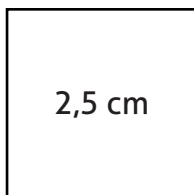

- 2 Após confirmar se o guia foi impresso corretamente, recorte-o ao longo da linha pontilhada de acordo com as indicações.


- 3 Coloque o guia de tamanho na base do seu nariz como mostrado na figura ao lado, e experimente cada tamanho para definir o mais adequado.



## ResMed

### AirFit™ N30i

Nasal cradle mask

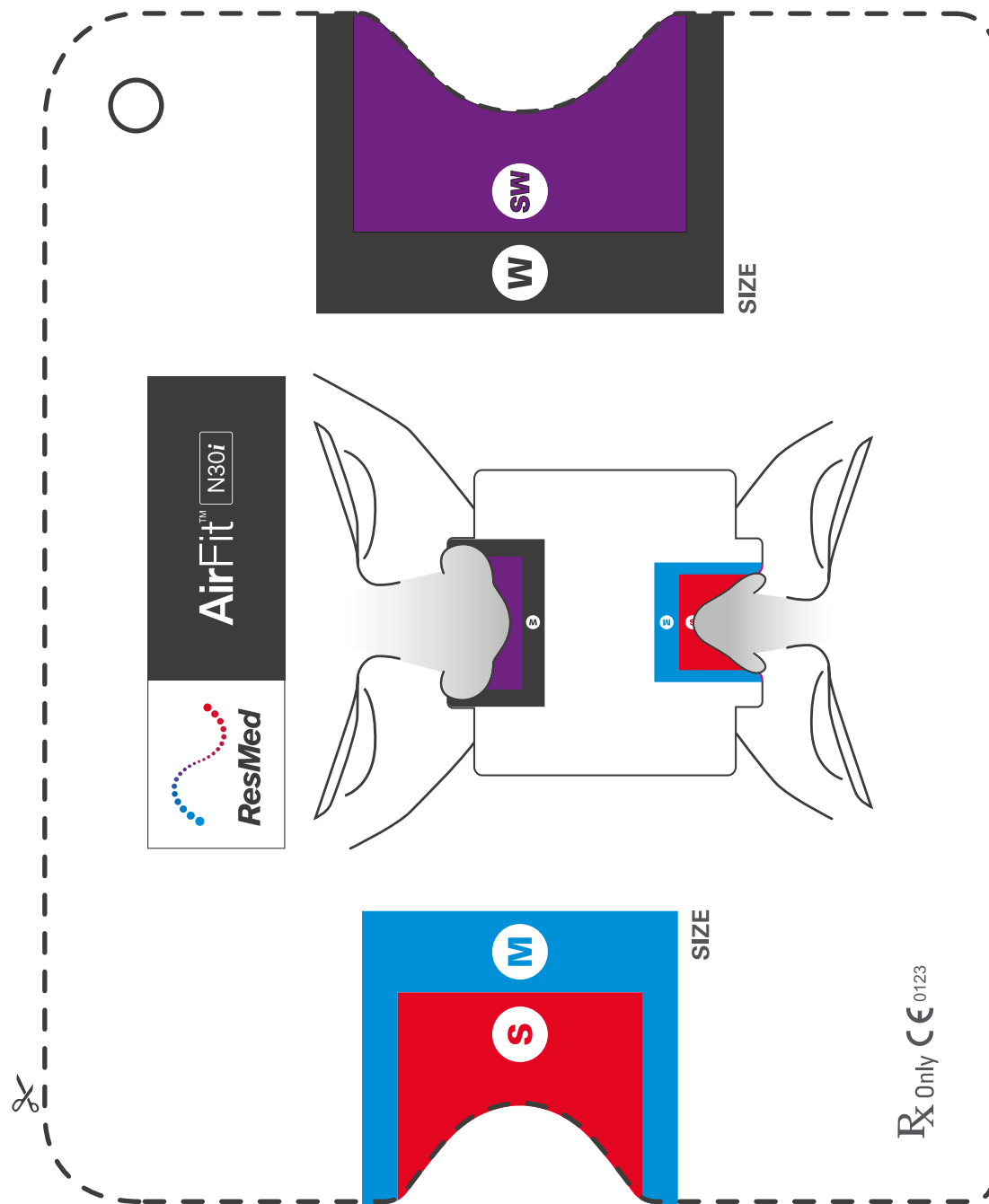

Rx Only CE 0123