

RESMED

H5i™

HEATED HUMIDIFIER



Welcome Guide


Português

S9™ Series
More. Comfort.

S9[™] | Series
More. Comfort.

Boas-vindas

Obrigado por ter escolhido o H5i. Antes de utilizar este dispositivo, leia os Manuais Informativo e de Boas-vindas na íntegra.

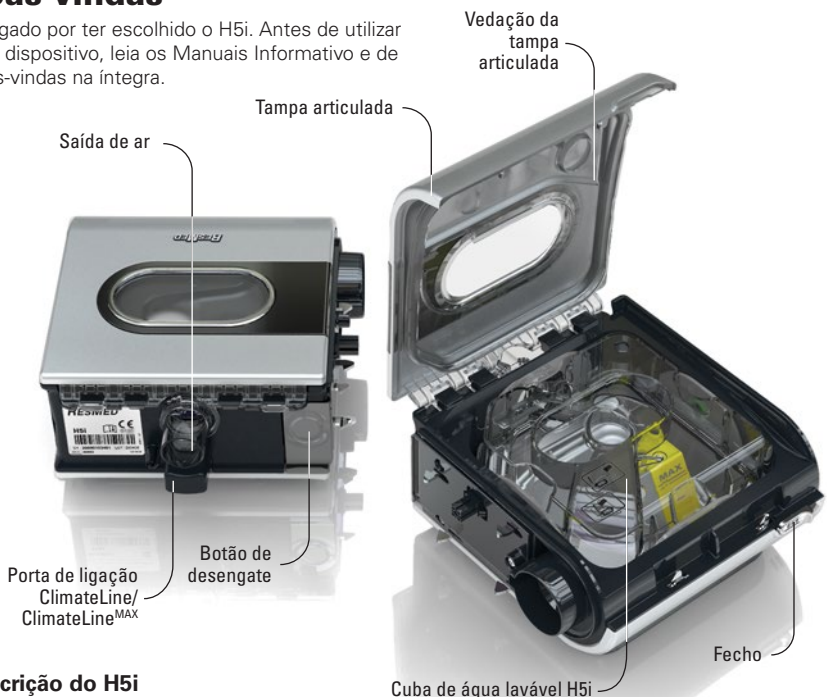

Descrição do H5i

O sistema H5i inclui os seguintes elementos:

- Humidificador aquecido H5i
- Cuba de água lavável H5i.


Os componentes opcionais incluem:

- Tubagem aquecida ClimateLine
- Tubagem aquecida ClimateLine^{MAX}
- Cuba de água H5i.

Sugestões para quando viajar

Quando se deslocar ou viajar com o H5i:

- certifique-se de que a cuba de água está vazia;
- desligue o H5i do S9 utilizando o botão de desengate.

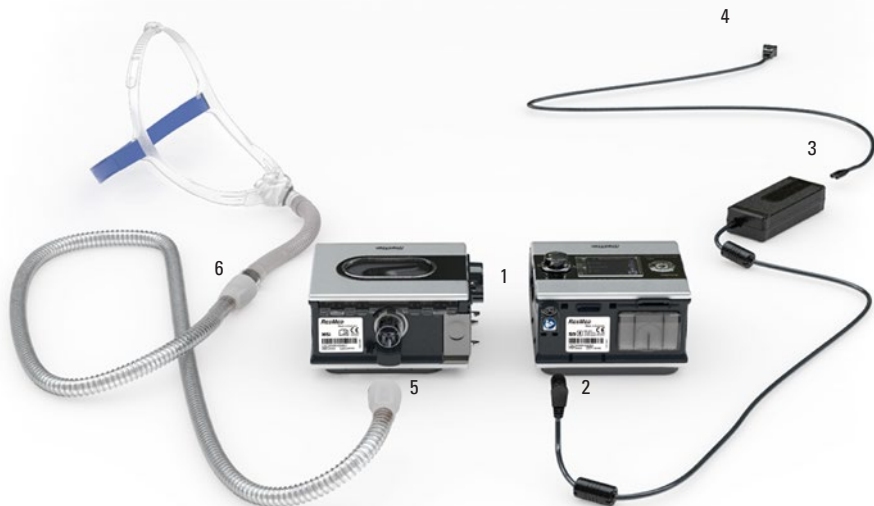

Configuração

1. Alinhe o H5i com o S9 e empurre-os um contra o outro até encaixarem.
2. Ligue a ficha CC da unidade de alimentação à parte de trás do S9.
3. Ligue o cabo eléctrico à unidade de alimentação.
4. Ligue a outra extremidade do cabo eléctrico à tomada.
5. Ligue, de forma segura, uma das extremidades da tubagem de ar à saída de ar.
6. Ligue a máscara montada à extremidade livre da tubagem de ar.

Notas:

- Coloque a unidade de alimentação afastada do H5i para permitir ventilação adequada.
- Para obter mais informações sobre a montagem da máscara, consulte o respectivo manual.
- As máscaras recomendadas estão disponíveis em www.resmed.com na página relativa aos Produtos na área de Serviço e assistência.

Enchimento da cuba de água

1. Abra o fecho e levante a tampa articulada.
2. Retire a cuba de água.
3. Encha a cuba (através do orifício central) com água até à marca de nível máximo (380 ml).
4. Volte a colocar a cuba de água no H5i.
5. Feche a tampa articulada e certifique-se de que encaixa devidamente.





Ecrã de LCD

Menu Início


Botão Iniciar/
Parar
Inicia ou pára o
tratamento.


Menu Config
Permite
alterar os
parâmetros.


Menu Info
Permite
visualizar
estatísticas de
sono.


Legenda:


Início 


Humidade 

Rampa 


Tubo aquecido 

Climate Control 

Iniciar/Parar 

Botão de
selecção 

Menu Config 

Menu Info 

Informações básicas sobre o S9





O painel de controlo do dispositivo S9 possui um ecrã de LCD, um botão de Iniciar/Parar, um botão de selecção e as teclas dos menus Info e Config.

Botão de selecção
Se rodar o botão, pode percorrer o menu e alterar parâmetros. Se premir o botão, pode aceder a um menu e confirmar as suas escolhas.

Ajuste do nível de humidade

Pode ajustar o nível de humidade entre Desl. e 6, a qualquer momento, para encontrar o parâmetro que considere mais confortável. Para ajustar o nível de humidade:






1. No ecrã INÍCIO, rode  até o ecrã HUMIDADE ser apresentado a azul.
2. Prima . A selecção aparece destacada a cor-de-laranja.
3. Rode  até aparecer o nível de humidade pretendido.
4. Prima  para confirmar a escolha.

Aquecimento do H5i

A função de aquecimento serve para pré-aquecer a água antes de iniciar o tratamento.

Para iniciar o aquecimento:

1. Navegue até ao ícone do nível de humidade.
2. Mantenha  premido durante três segundos. É apresentada a barra de estado do aquecimento.



Pode interromper o aquecimento a qualquer momento premindo  durante pelo menos três segundos. Pode iniciar o tratamento a qualquer momento premindo .

Nota: para ajudar a arrefecer a placa de aquecimento, o dispositivo S9 continuará a fornecer ar durante até uma hora após o tratamento terminar. Contudo, pode desligar o dispositivo da tomada em qualquer altura e deixar que a placa de aquecimento arrefeça sem fluxo de ar.





Introdução

1. Certifique-se de que o S9 e o H5i estão ligados e que a cuba de água está cheia até à marca de nível máximo.
2. Ajuste o nível de humificação, se necessário.
3. Coloque a máscara tal como é descrito nas respectivas instruções do utilizador.
4. Para iniciar a terapia, basta respirar para dentro da máscara e/ou premir .
5. Deite-se e disponha a tubagem de ar de modo que esta possa mover-se no caso de se voltar enquanto dorme.
6. Para parar o tratamento em qualquer altura, retire a máscara e/ou prima .

Notas:

- Se o seu médico tiver activado a função SmartStart, o dispositivo começará a funcionar automaticamente quando respirar para dentro da máscara e parará automaticamente quando retirar a máscara.
- Uma vez iniciada a terapia, é apresentado o ecrã de tratamento.

Limpeza e manutenção

Deverá levar a cabo regularmente a limpeza e manutenção da forma descrita nesta secção.

Desmontagem do H5i

1. Abra o fecho.
2. Levante a tampa articulada.
3. Retire a cuba de água.
4. Despeje a água que resta na cuba.
5. Desencaixe os quatro fechos laterais.
6. Separe a tampa da cuba, a placa e a base.



Limpeza diária

1. Desmonte e lave a tampa da cuba, a placa e a base em água tépida com um detergente suave.
2. Enxágue bem com água limpa e deixe secar afastadas da luz solar directa.

Nota: também pode lavar a tampa da cuba, a placa e a base desmontadas numa máquina de lavar louça, utilizando um ciclo delicado ou para cristais (apenas na cesta superior).

Limpeza mensal

1. Retire a vedação da tampa articulada e lave-a em água tépida com um detergente suave.
2. Limpe o exterior do H5i com um pano húmido e detergente suave.

Nova montagem do H5i

1. Volte a colocar a placa na base, certificando-se de que a marca de nível máximo da água fica voltada para cima.
2. Volte a colocar a tampa da cuba na placa/base e verifique se os orifícios centrais estão alinhados.
3. Encaixe os quatro fechos laterais.
4. Encha a cuba de água e volte a colocá-la no H5i.
5. Feche a tampa articulada e certifique-se de que encaixa devidamente.



Lista de verificação para manutenção

- ✓ Inspeccione a cuba de água e a vedação da tampa articulada para verificar se apresentam desgaste e degradação.
- ✓ Substitua a cuba de água se algum componente apresentar fugas ou tiver fendas, manchas ou estiver picado.
- ✓ Substitua a vedação da tampa articulada se esta apresentar fendas ou estiver rasgada.
- ✓ Limpe os depósitos de pó branco na cuba de água utilizando uma solução com uma parte de vinagre e 10 partes de água.

S9[™] | Series
More. Comfort.

368882/2 2017-09

H5i

WELCOME

EUR 1/3



Manufacturer: ResMed Pty Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia.

See www.resmed.com for other ResMed locations worldwide.

For patent information, see www.resmed.com/ip.

H5i is a trademark of ResMed Pty Ltd and is registered in U.S. Patent and Trademark Office.

© 2017 ResMed.

CE 0123