



# CPAPS

TERAPIA DO SONO

# C-Series Tango™ - Manual do Usuário (Tradução Completa para Português)

## Uso Indicado

O sistema CPAP Tango é indicado para o tratamento da Apneia Obstrutiva do Sono (AOS) em pacientes com peso superior a 30 kg. Pode ser utilizado em ambiente domiciliar ou hospitalar.

**ATENÇÃO:** Este equipamento é de venda restrita, podendo ser comercializado apenas mediante prescrição médica.

## Contraindicações

A terapia com pressão positiva nas vias aéreas pode ser contraindicada em pacientes com as seguintes condições:

- Doença pulmonar bolhosa grave
- Pneumotórax
- Hipotensão arterial patológica
- Desidratação
- Fístula de líquido cefalorraquidiano, cirurgia ou trauma craniano recentes

## Possíveis Efeitos Adversos


Durante o uso do Tango podem ocorrer os seguintes efeitos adversos:

- Ressecamento do nariz, boca ou garganta
- Sangramento nasal
- Distensão abdominal (ingestão de ar)
- Desconforto em seios da face ou ouvidos
- Irritação ocular
- Irritações cutâneas ou erupções

## Partes do Equipamento

O Tango é composto por:

- Gerador de fluxo C-Series Tango
- Cabo de energia
- Tubo de ar (traqueia) de 2 metros

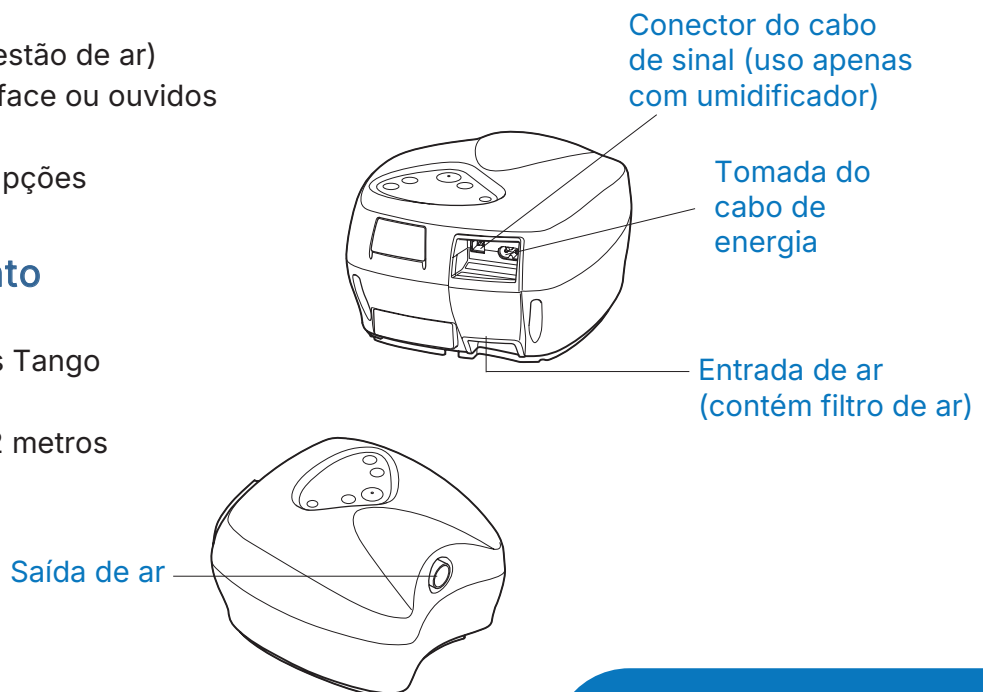

- Entrada de ar (com filtro de ar)
- Saída de ar
- Conector para cabo de sinal (apenas para uso com umidificador)

## Máscaras Compatíveis

As máscaras recomendadas para uso com o Tango incluem:

- Mirage™ Full Face Series II
- Ultra Mirage™ Full Face
- Mirage Quattro™ Full Face
- Mirage Liberty™ Full Face
- Meridian™ Nasal
- Mirage™ Nasal
- Mirage Activa™ Nasal
- Mirage Vista™ Nasal
- Ultra Mirage™ II Nasal
- Papillon™ Nasal
- Silent Papillon™ Nasal
- Mirage Swift™ e Mirage Swift II (almofadas nasais)


## Umidificadores

Para informações sobre o uso do Umidificador Aquecido C-Series da ResMed ou do ResMed Passover, consulte o manual do respectivo umidificador.

## Interface do Tango


A interface possui os seguintes indicadores e controles:

- Indicador de energia (equipamento ligado)
- Indicador de aquecimento (quando o umidificador está em uso)
- Modo de espera: exibe as horas de uso e permite ajustes de altitude e rampa
- Função Rampa: inicia com pressão baixa e aumenta gradualmente até a pressão prescrita
- Função Altitude: compensa diferenças de pressão atmosférica

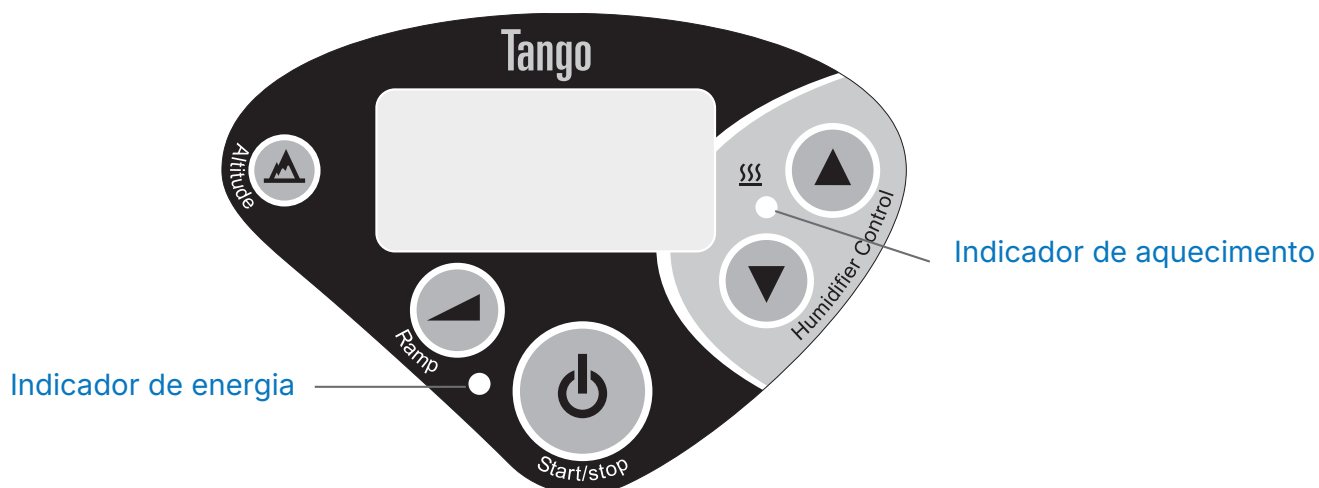

## Configuração e Uso do Equipamento

1. Conecte o cabo de energia na parte traseira do Tango e depois na tomada.
2. Conecte a traqueia na saída de ar.
3. Conecte a máscara à extremidade livre da traqueia.
4. Para iniciar a terapia, pressione o botão ligar. Se configurada, a função rampa será exibida no visor.
5. Para parar a terapia, pressione o botão desligar.

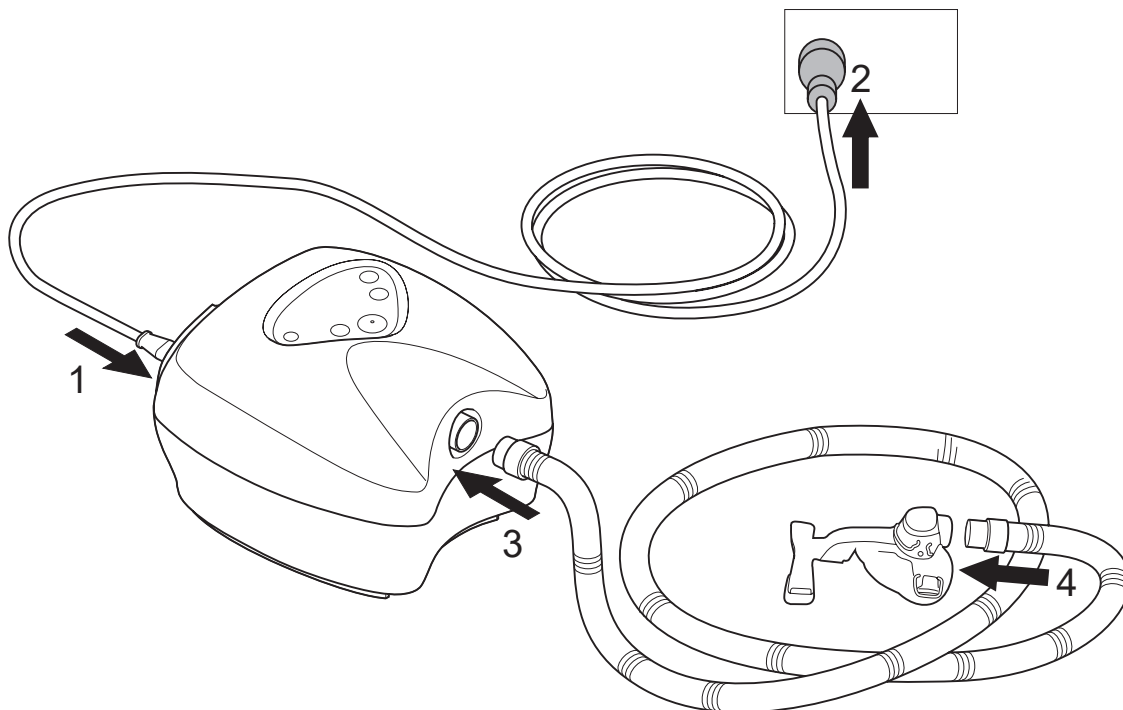


## Limpeza e Manutenção

**ADVERTÊNCIA:** risco de choque elétrico. Nunca mergulhe o gerador de fluxo ou o cabo de energia em água.

Recomendações:

- Diariamente: desconecte a traqueia e deixe secar em local limpo e seco.
- Semanalmente: lave a traqueia com água morna e detergente neutro, enxágue bem e deixe secar.
- Mensalmente: limpe o exterior do Tango com pano úmido e verifique o filtro de ar, substituindo a cada 6 meses.

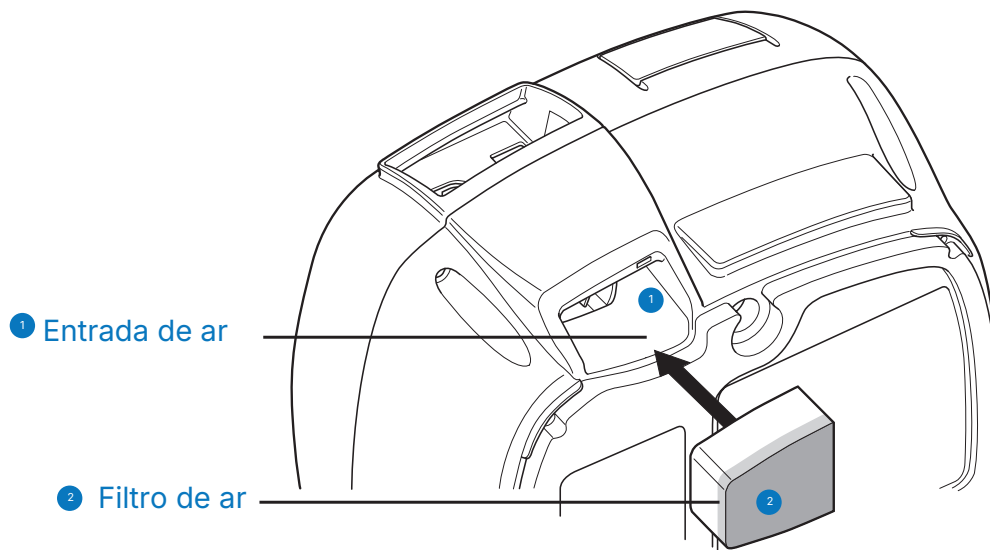

## Especificações Técnicas

- Faixa de pressão: 4 a 20 cmH2O
- Dimensões: 215 x 189 x 95 mm (8,5 x 7,5 x 3,5 pol.)
- Peso: 1,2 kg
- Alimentação: 110V, 60Hz, consumo típico 20VA/10W
- Temperatura de operação: +5°C a +40°C
- Umidade de operação: 10 a 95% sem condensação
- Classificação: IEC 60601-1, Classe II, Tipo CF

## Avisos e Precauções Gerais

- Leia todo o manual antes de utilizar o equipamento.
- Use somente máscaras e acessórios recomendados pela ResMed.
- Nunca obstrua os orifícios de ventilação da máscara.
- Em caso de falha elétrica, remova imediatamente a máscara.
- O uso de oxigênio deve ser feito com cautela e nunca em ambiente com chama aberta.
- Não abra o equipamento: não há partes reparáveis pelo usuário.

## Garantia Limitada

A ResMed garante seus produtos contra defeitos de fabricação dentro dos seguintes prazos:

- Geradores de fluxo: 2 anos
- Umidificadores: 1 ano
- Máscaras, câmaras de água e acessórios: 90 dias (exceto itens descartáveis)

A garantia não cobre danos por uso inadequado, modificações, fumaça ou contato com líquidos.

## Fabricante e Representantes

ResMed Pty Ltd – Bella Vista NSW, Austrália

ResMed Corp – Poway, Califórnia, EUA

ResMed (UK) Ltd – Abingdon, Oxfordshire, Reino Unido

Outros escritórios em diversos países (consulte [www.resmed.com](http://www.resmed.com)).