

PHILIPS
RESPIRONICS

DreamWear

Redescubra os seus sonhos

DreamWear – como se não estivesse a usar nada*

Conexão de topo

permite ao seu paciente liberdade de movimento

Estrutura flexível macia

Garante um contacto suave com o rosto do paciente

| | |
|---------|---------|
| Pequena | 1116745 |
| Média | 1116746 |
| Grande | 1116747 |



Revestimentos em tecido

Garantem uma interface suave com o rosto do paciente

| | |
|--------------------|---------|
| Revestimentos (x2) | 1116754 |
|--------------------|---------|

Arnês de linhas minimalistas

| | |
|-------|---------|
| Arnês | 1116750 |
|-------|---------|

Almofada nasal

por baixo do nariz

Previne marcas vermelhas, desconforto ou irritação nas narinas ou na pirâmide nasal

Almofada nasal

| | |
|-------------|---------|
| Pequena | 1116740 |
| Média | 1116741 |
| Grande | 1116742 |
| Média larga | 1116743 |

O Fit Pack inclui 4 tamanhos de almofada nasal (S, M, L, MW) e 1 estrutura de tamanho médio.

Máscara com arnês

Internacional ⁽²⁾

Global ⁽¹⁾

| | | |
|-------|---------|---------|
| Média | 1116720 | 1116700 |
|-------|---------|---------|

*Questionário sobre as Preferências dos Utilizadores da Philips 2015, dados em arquivo.

**A máscara não entra diretamente em contacto com a pirâmide nasal ou narinas.

Sugestões úteis

Seguem-se algumas sugestões a ter em conta aquando da colocação e utilização da sua máscara de tratamento de distúrbios respiratórios do sono DreamWear.

Para ficar a saber mais visite o nosso guia em vídeo em philips.com/dreamfamily



- Antes de utilizar a máscara, lave manualmente toda a máscara (consulte a secção de Cuidados a Ter com a Máscara nas suas Instruções de utilização). Lave o rosto. Não utilize hidratante nem creme nas mãos ou no rosto.
- Estão disponíveis quatro tamanhos de almofada nasal (S, M, L, MW). Coloque o medidor por baixo do nariz para determinar o tamanho da almofada nasal correto. Para um melhor desempenho, utilize a almofada nasal mais pequena que se adapta ao seu nariz.
- O erro mais comum ao ajustar é apertar demasiado o arnês. Provocando vermelhidão, feridas ou pele inchada à volta das extremidades da máscara.

Instruções de colocação



1 Segure no medidor horizontalmente por baixo do nariz e selecione o tamanho da almofada nasal com base no ponto em que a extremidade nasal, alinha com o medidor.



2 A abertura da almofada nasal ficará diretamente por baixo das suas narinas. Ajustando-se ao seu nariz para que a fuga seja mínima.

(O seu nariz nunca deverá ficar dentro da abertura da almofada nasal. Se alguma parte se sobrepuser ao seu nariz, a almofada nasal está a ser mal utilizada.)



3 Com a máscara montada, coloque a almofada nasal por baixo do seu nariz.



4 Posicione a estrutura na parte superior da cabeça.



5 Puxe o arnês sobre a parte posterior da cabeça.



6 Para ajustar a máscara, desprenda as patilhas do arnês do tecido. Ajuste o comprimento e volte a pressionar as patilhas contra o tecido para prender.

(Nota: Não aperte demasiado o arnês.)



7 Posicione a máscara de forma a se sentir confortável. Depois de colocada, o cotovelo deve estar assente na parte superior da cabeça.

Dimensão da estrutura da máscara

A estrutura da máscara média (MED) irá adaptar-se confortavelmente à maioria dos rostos. Se a estrutura MED não se adaptar ao seu rosto, entre em contacto com o seu fornecedor de cuidados médicos para verificar se uma estrutura de máscara pequena (SM) ou grande (LG) se adequa melhor a si.

(1) Global: Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, Italiano, Holandês, Português do Brasil.

(2) Internacional: Alemão, Árabe, Búlgaro, Cazaque, Checo, Croata, Dinamarquês, Eslovaco, Esloveno, Espanhol, Estónio, Finlandês, Francês, Grego, Hebreu, Húngaro, Inglês, Italiano, Letão, Lituano, Macedónio, Holandês, Norueguês, Polaco, Português, Romeno, Russo, Servo, Sueco, Turco, Ucrâniano.

© 2016 Koninklijke Philips N.V. Todos os direitos reservados.
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

www.philips.com/respironics
Broudy CSP 3/18/16 MCI 4107235 PN 1127235

